

אחזקת הטכנולוגיה

המלצות וחשיבות אחזקת הטכנולוגיה שברשותך

מיקום המכשיר בחדר – אין להצמיד את המכשיר לקיר על מנת לאפשר כניסת אויר תקינה למערכת. אין למקם את המכשיר תחת שמש ישירה.

ניקוי אבק- סביבת המכשיר חייבת להיות נקייה מאבק. לשמירה שוטפת של המכשיר יש לוודא תמיד שרשת האוורור נקייה מאבק. מומלץ לשאוב את פתחי האוורור אחת לשבוע.

טמפרטורה נדרשת בחדר הטיפולים : 20 - 23 מעלות

משקפי מגן – חלה חובה על המטפל והמטופל להרכיב משקפי הגנה בזמן הטיפול. אין להסתכל ישירות בקרן האור/הלייזר הנפלטים מהידית למניעת פגיעה או נזק לעיניים.

אין לעבוד עם המכשיר בחדר שבו יש מראות ו/או כל חומר המחזיר אור/הבזקים.

ניקיון הידיות וחלקיהן – יש לנקות את שאריות הג'ל מהידית ולחטא את הידיות עם אלכוהול 70% לפני ובסיום כל טיפול.

מניעת שבר ו/או נפילה של ידית- בכדי למנוע נפילה או מכות העלולות לפגוע בידיה, יש להשתמש בתופסן הידית בכל שימוש ו/או הוצאה של הידית מהמתקן. ידיות שאינן בשימוש רצוי לאחסן במזוודה.

אין למשוך את המכשיר מהכבלים/ צינור הידיות/ כבל דושה אלא מידיות הנשיאה בלבד.

בהתאם להוראות היצרן, המכשיר מצריך טיפולי תחזוקה שוטפים אחת לשנה, הכוללים החלפת פילטרים, ניקיון המים ממיכל המים ובדיקת תקינות המערכת. במקרה הצורך, יש למלא מים מזוקקים בלבד.

לשירות לקוחות וטיפול בתקלות: 050-715-715-5

